


# LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™

## Wundspreizring und Hauthaken


Komplettsystem zum Zurückziehen von Weichgewebe vom Operationsfeld




Das Operationsfeld wie üblich präparieren und abdecken. LiNA SeaStar gemäß den folgenden Anweisungen anbringen:

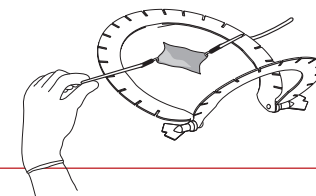

1. LiNA SeaStar um den Anschnitt herumlegen und den LiNA Skin Hook im direkt gegenüberliegenden Quadranten unter gleichmäßigem Druck einführen.

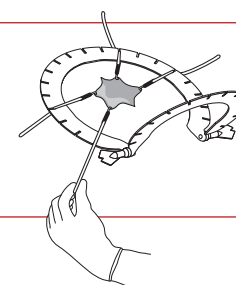

2. Beim Fortsetzen des Dissektionsverfahrens den LiNA Skin Hook in tiefere Schichten der Faszie führen. Es können dann weitere Haken verwendet oder bereits vorhandene umgelegt werden, damit man von allen Winkeln gleichmäßig zurückziehen kann.

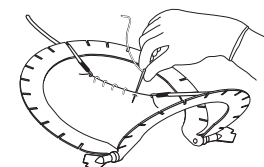

3. Zum leichteren Schließen eine gleichbleibende gegenseitige Spannung beibehalten.

### Bestellinformationen:

LiNA SeaStar™ und Skin Hook™ **CE 0459**

REF: Zum einmaligen Gebrauch, steril	REF: Wieder-verwendbar, nicht steril	Produkt	Verpackung, zum einmaligen Gebrauch	Verpackung, wieder-verwendbar
4000-S-Q		LiNA SeaStar – quadratisch. 18 cm x 18 cm. 62 g. (7 Zoll x 7 Zoll 2,2 Unzen)	5er-Schachtel	
4000-S-SS	4000-R-SS	LiNA SeaStar – kleiner/kleiner. 29 cm x 19 cm. 75 g. (11 Zoll x 7 Zoll 2,6 Unzen)	5er-Schachtel	1er-Schachtel
4000-S-SL	4000-R-SL	LiNA SeaStar – kleiner/großer. 35 cm x 22 cm. 94 g. (14 Zoll x 9 Zoll 3,3 Unzen)	5er-Schachtel	1er-Schachtel
4000-S-VV	4000-R-VV	LiNA SeaStar – V-Form/V-Form. 23 cm x 19 cm. 53 g. (9 Zoll x 7 Zoll 1,9 Unzen)	5er-Schachtel	1er-Schachtel
4000-S-VS	4000-R-VS	LiNA SeaStar – V-Form/kleiner. 26 cm x 19 cm. 64 g. (10 Zoll x 7 Zoll 2,3 Unzen)	5er-Schachtel	1er-Schachtel
4000-S-VL	4000-R-VL	LiNA SeaStar – V-Form/großer. 32 cm x 22 cm. 83 g. (13 Zoll x 9 Zoll 2,9 Unzen)	5er-Schachtel	1er-Schachtel
	4000-R-SRW	LiNA SeaStar Schrauben.		10er-Schachtel
SH-110		LiNA Skin Hook – kleiner scharfer Haken	2 Stück pro Beutel, 5 Beutel pro Karton	
SH-120		LiNA Skin Hook – kleiner stumpfer Haken	2 Stück pro Beutel, 5 Beutel pro Karton	
SH-220		LiNA Skin Hook – großer stumpfer Haken	2 Stück pro Beutel, 5 Beutel pro Karton	

Quality Management System  
NF EN ISO13485:2016

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com  
CVR: 10054974



# LiNA SeaStar™ und LiNA Skin Hook™

LiNA SeaStar und LiNA Skin Hook sind ein Komplettsystem zum Zurückziehen von empfindlichem und festem Gewebe. Das flexible Design des Systems ermöglicht eine leichte Verstellung und Umpositionierung des LiNA SeaStar während des chirurgischen Eingriffs und sorgt so für eine optimale Freilegung der Operationsstelle.

## sicher

### Selbsttragend

- LiNA SeaStar und LiNA Skin Hook bilden ein selbsthaltendes System, das es dem Chirurgen und dem chirurgischen Assistenten ermöglicht, die Hände für die Bewältigung anderer Aufgaben im Operationssaal frei zu haben.

## funktional

### Großes Angebot an LiNA SeaStar Wundspreizringe


- **LiNA SeaStar**  
LiNA SeaStar ist in einer großen Auswahl von Formen und Größen erhältlich, die leicht verstellbar sind und in unterschiedliche anatomische Bereiche eingepasst werden können. Sie erleichtern verschiedene chirurgische Eingriffe wie etwa in der Vaginal- und Rektumchirurgie.
- **LiNA Skin Hook**  
Durch die Befestigung des LiNA Skin Hook an den LiNA SeaStar wird die Inzision besser freigelegt. Der flexible und elastische Haken ist während des Eingriffs verstellbar, so dass die Spannung optimal eingestellt werden kann. Der LiNA Skin Hook ist mit 3 verschiedenen Edelstahlhaken erhältlich.



LiNA SeaStar gibt es als Einwegsystem (S) und als wiederverwendbares System (R). Ausnahme ist das quadratische Modell, das nur als Einwegsystem bestellt werden kann.



REF 4000-S-SL  
REF 4000-R-SL

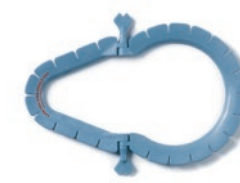


REF 4000-S-VS  
REF 4000-R-VS



REF 4000-S-SS  
REF 4000-R-SS



REF 4000-S-VV  
REF 4000-R-VV

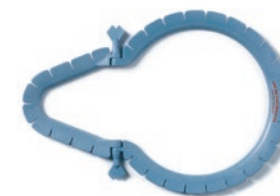

REF 4000-S-VL  
REF 4000-R-VL



REF 4000-S-Q



REF SH-110  
Kleiner scharfer Haken



REF SH-120  
Kleiner stumpfer Haken



REF SH-220  
Großer stumpfer Haken